



알파스팀(Alpha-Stim) AID 간편 사용 설명서



1 전원버튼

타이머 표시기

전류 강도

2

타이머 변경



타이머


4

강도 변경



시작하기 전에

- 자극적이지 않은 순한 비누와 물, 알코올 패드 또는 항균 물티슈로 귀볼을 청소하고 피부를 건조시키십시오.

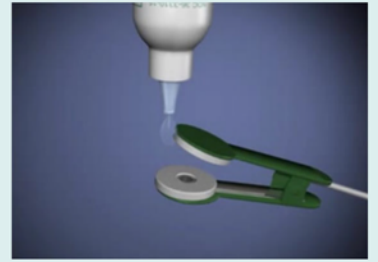

- 전극 용액 몇 방울로 새 이어클립 패드 Earclip Electrode Pad (EEPs™)를 충분히 적십니다.

1




1. 기기 전원 켜기

2




2. 전류가 2.5 이상이면 타이머를 20분으로, 전류가 2 이하이면 1시간으로 설정합니다.

3

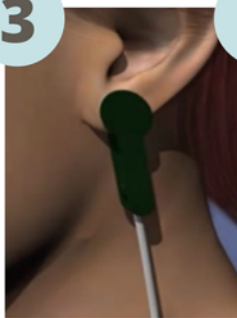

3. 각 귀볼에 하나의 Earclip을 적용합니다.(전도성 전극용액으로 이어클립 패드를 미리 적셔놓음)

4

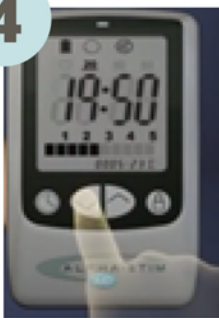

4. 약간의 어지러움이 느껴질 때까지 전류를 높이다가 현기증이 멈출 때까지 즉시 감소시킵니다.

항상 치료를 완료하십시오

- 정해진 시간에 세션이 종료되고 "무거운" 느낌이 계속 되면 무거움이 사라지고 가벼운 느낌이 나타날 때까지 치료를 재개하십시오.

치료 후

- 이어클립 패드 제거하고 폐기하십시오.
- 알코올로 이어클립을 청소하고 건조시킨 다음 4개의 이어클립 패드를 교체하십시오.

사용 방법 비디오를 보시려면 www.alpha-stim.kr/user_guide.html을 방문하십시오.
상담 전화를 원하시면 070-7528-3688로 전화하십시오.